

Ver 8

検査案内書

(化膿性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群遺伝子検査)

運用開始日 2025 年 4 月 1 日

かずさ遺伝子検査室

改訂履歴一覧表

No.	改訂内容	Ver.	運用開始日	作成者	承認者
1	新規作成	1	2017/05/31	小原 収	森 千恵
2	連絡先アドレスの訂正 検査依頼書見本(添付②)の差し替え	2	2017/7/25	小原 収	森 千恵
3	遺伝子検査名の修正（ざ瘡症候群→ アクネ症候群） 検査依頼書見本(添付②)の差し替え	3	2017/9/11	小原 収	森 千恵
4	検査依頼書見本(添付②)の削除と対 応する項目(11)の追記	4	2018/4/2	細川淳一	森 千恵
5	概略の修正(報告対象の明文化)	5	2019/4/1	細川淳一	糸賀 栄
6	書式変更	6	2022/4/1	細川淳一	糸賀栄
7	(11)検査依頼書の記載項目の変更	7	2023/4/1	森 千恵	糸賀栄
8	表紙の変更	8	2025/4/1	森 千恵	糸賀栄

検査項目：「化膿性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群」

検査名：【化膿性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群遺伝子検査】

概略

化膿性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群は *PSTPIP1* (CD2BP1) の機能獲得型変異による常染色体優性遺伝病である。主として3歳以下に化膿性無菌性関節炎として発症し、思春期以降に壊疽性膿皮症、嚢腫性ざ瘡(膿疱が目立ちしこりを形成するざ瘡)を呈するが、周期性発熱を呈さない。その他に、脾腫、溶血性貧血、血小板減少、アレルギー、糸球体腎炎、糖尿病、非特異的肝炎、炎症性腸疾患、ブドウ膜炎、学習障害など、様々な合併症が報告されている。

化膿性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群の重症型として、高亜鉛血症・高カルプロテクチン血症症候群が報告されている。化膿性無菌性関節炎、壊疽性膿皮症、嚢腫性ざ瘡の他に、肝脾腫、汎血球減少、血中の亜鉛、カルプロテクチンの高値が認められる。診断確定には遺伝子診断が必要である。本検査は *PSTPIP1* のタンパク質コード領域エクソンとその両端のスプライス部位領域を、次世代シーケンサーで解析し、主に検出されたアレル頻度1%以下の稀なバリエーションについて報告する。なお大規模欠失・挿入等のコピー数変化や大規模なゲノム構造変化に関しては高精度での検出が短鎖リード型の次世代シーケンサーでは困難なため、報告対象としない。体細胞モザイクについてはバリエーションコーラーで検出できたものに関しては報告するが、バリエーションコーラーで検出できなかったものに関しては報告しない。

(1) 検査方法

血液から回収したゲノムDNAから、該当する検査対象遺伝子のたんぱく質コード領域エクソンとそのイントロン境界部分をハイブリダイゼーションあるいは酵素的増量法 (polymerase chain reaction 法、PCR 法と略) により濃縮し、次世代シーケンサーあるいはキャピラリーシーケンサーによる遺伝子配列決定を行い、検査対象遺伝子のたんぱく質コード領域における低出現頻度の塩基配列変化の有無を検出する。原則血液のみの受け入れとするが、やむを得ない場合は調整されたDNAも受け入れる。この場合は個々の事例により判断するものとする。

(2) 基準値及び判定基準

国際的に用いられているヒトゲノムリファレンス配列との比較から、低出現頻度変異の有無を判定する。

(3) 医療機関に緊急報告を行うこととする検査値の範囲

特になし。本検査は緊急性を要するものではありません。

(4) 検査に要する日数

検体が本所に届いた日から 60 営業日以内。

(5) 測定を委託する場合にあっては、実際に測定を行う衛生検査所の名称

測定のコマンドはありません。

(6) 検体の採取条件

医療機関にて検査の目的や限界について十分に説明し、本検査の申し込みの意思を確認する。

(7) 検体の採取容器

弊所発行の匿名化 ID 記載ラベルが貼付された採血管 1 本
(真空密封型採血管 EDTA-2K (または Na) 顆粒)

(8) 検体の採取量

血液 1mL 以上を採血する。

(9) 検体の保存条件

採血後は、速やかに冷蔵または凍結保管する。

(10) 検体の提出条件

上記 (7)、(8)、(9) を満たす検体について、箱に入れて室温にて本所に発送する
(必要に応じて、保冷剤の同梱も可)。発送日の翌日に到着することを原則とする。

(11) 検査依頼書及び検体のラベルの記載項目

検体貼付ラベルには匿名化 ID ならびに検体管理用 ID を記載する。

検査依頼書は、当検査室指定の様式を使用する。主な記載項目を以下に示す。

- ・匿名化 ID
- ・希望する検査項目 (疾患名、検査コード番号、検体数)
- ・医療機関情報
- ・ガイドライン遵守の確認
- ・請求書送付先情報

(12) 検体を医療機関から衛生検査所(他の衛生検査所に測定を依頼する場合に

あたっては、当該衛生検査所等)まで搬送するのに要する時間

発送日の翌日到着を原則とする。

土日祝日は受付け不可なので、医療機関には十分な注意を促す。

(13) 免責事項

なし

(14) 検査のお申し込み、お問い合わせ

公益財団法人かずさ DNA 研究所 遺伝子検査室 (かずさ遺伝子検査室)

〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足 2 丁目 5-23

<https://www.kazusa.or.jp/genetest/index.html>

E-mail : onjk@kazusa.or.jp