

検査案内書

乳児全身性動脈石灰化症(GACI)遺伝子検査

(スポンサープログラム)

【非保険検査】

運用開始日 2025年9月1日

かずさ遺伝子検査室

改訂履歴一覧表

No.	改訂内容	Ver.	運用開始日	作成者	承認者
1	新規作成	1	2025/2/14	細川淳一	糸賀栄
2	表紙の変更	2	2025/4/1	森千恵	糸賀栄
3	検査名から会社名の削除	3	2025/9/1	糸賀栄	小原收
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

検査項目：「乳児全身性動脈石灰化症(GACI)遺伝子検査（スポンサープログラム）」

乳児全身性動脈石灰化症（GACI）は、稀でしばしば致死的な遺伝性疾患であり、全身の循環系、特に大・中型動脈に影響を及ぼす。ENPP1 や ABCC6 などの遺伝子異常により、ハイドロキシアパタイト結晶形成を阻害する血中ピロリン酸の低下を引き起こす。血中ピロリン酸の低下は、血管の内弾性層の石灰化や筋肉動脈の線維性筋内膜増殖を引き起こし、その結果として動脈狭窄をもたらす。動脈狭窄と石灰化により、GACI の新生児は出生時に高血圧、心不全、腎不全の臨床症状を示すことが多い。この疾患を有する新生児は、生後早期に脳梗塞、心筋梗塞、腎不全を起こす危険性もある。この疾患は胎児期に発症することもあるが、出生後に診断されることが多い。

本検査では *ABCC6*, *ENPP1* 遺伝子のタンパク質コード領域エクソンとその両端のスーパーイース部位領域を次世代シーケンサーで解析し、主に検出されたアレル頻度 1%以下の稀な一塩基置換と短い挿入・欠失について報告する。短鎖リード型次世代シーケンサーのデータの補完が必要な場合は、サンガー法によるキャピラリーシーケンサーでの解析を行う。なお大規模欠失・挿入等のコピー数変化や大規模なゲノム構造変化に関しては高精度での検出が短鎖リード型の次世代シーケンサーでは困難なため、報告対象としない。体細胞モザイクについてはバリエントコーラーで検出できたものに関しては報告するが、バリエントコーラーで検出できなかったものに関しては報告しない。なお *ABCC6*(NM_001171) ex1-9 は相同領域を認めるため、報告対象外とする。また上記領域に加え、下記の領域も解析に追加する。

遺伝子名	position (hg38)	HGVS. c
<i>ABCC6</i>	chr16:16155077	c. 3883-46A>G (NM_001171.6)
<i>ABCC6</i>	chr16:16178976-16178977	c. 2248-12_2248-11delTT (NM_001171.6)
<i>ABCC6</i>	chr16:16187240	c. 1780-29T>A (NM_001171.6)

(1) 検査方法

血液から回収したゲノム DNA から、該当する検査対象遺伝子のたんぱく質コード領域エクソンとそのイントロン境界部分をハイブリダイゼーションあるいは酵素的増量法 (polymerase chain reaction 法、PCR 法と略) により濃縮し、次世代シーケンサーによる遺伝子配列決定を行い、検査対象遺伝子のたんぱく質コード領域における低出現頻度の塩基配列変化の有無を検出する。原則血液のみの受け入れとするが、やむを得ない場合は調整された DNA も受け入れる。この場合は個々の事例により

判断するものとする。

(2) 基準値及び判定基準

国際的に用いられているヒトゲノムリファレンス配列との比較から、低出現頻度変異の有無を判定する。

(3) 医療機関に緊急報告を行うこととする検査値の範囲

特になし。本検査は緊急性を要するものではありません。

(4) 検査に要する日数

検体が本所に届いた日から 60 営業日以内。

(5) 測定を委託する場合にあつては、実際に測定を行う衛生検査所の名称

測定のご委託はありません。

(6) 検体の採取条件

医療機関にて検査の目的や限界について十分に説明し、本検査の申し込みの意思を確認する。

(7) 検体の採取容器

弊所発行の匿名化 ID 記載ラベルが貼付された採血管 1 本
(真空密封型採血管 EDTA-2K (または Na) 顆粒)

(8) 検体の採取量

血液 1mL 以上を採血する。

(9) 検体の保存条件

採血後は、速やかに冷蔵または凍結保管する。

(10) 検体の提出条件

上記 (7)、(8)、(9) を満たす検体について、箱に入れて室温にて本所に発送する
(必要に応じて、保冷剤の同梱も可)。発送日の翌日に到着することを原則とする。

(11) 検査依頼書及び検体のラベルの記載項目

検体貼付ラベルには匿名化 ID ならびに検体管理用 ID を記載する。

検査依頼書は、当検査室指定の様式を使用する。主な記載項目を以下に示す。

- ・匿名化 ID
- ・希望する検査項目 (疾患名、検査コード番号、検体数)
- ・医療機関情報
- ・ガイドライン遵守の確認
- ・請求書送付先情報

(12) 検体を医療機関から衛生検査所(他の衛生検査所に測定を依頼する場合にあたっては、当該衛生検査所等)まで搬送するのに要する時間

発送日の翌日到着を原則とする。

土日祝日は受け付け不可なので、医療機関には十分な注意を促す。

(13) 免責事項

なし

(14) 検査のお申し込み、お問い合わせ

公益財団法人かずさ DNA 研究所 遺伝子検査室 (かずさ遺伝子検査室)

〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足 2 丁目 5-23

<https://www.genetest.jp/index.html>

E-mail : onjk@kazusa.or.jp